

BlindShell Lite Gebruikershandleiding

BlindShell Lite is een volledig vocale telefoon voor slechtzienden en blinde gebruikers. De belangrijkste kenmerken van de telefoon zijn de eenvoud en het fysieke toetsenbord.

Aan de slag

Inhoud van de verpakking:

- BlindShell Lite telefoon
- Batterij
- USB-lader
- USB-kabel
- oortjes

Beschrijving van de telefoon

Voorkant van de telefoon

Het bovenste deel van de telefoon wordt bezet door een LCD-scherm, een gladde oppervlakte die ongeveer de helft van de voorkant van de telefoon bedekt. De inkeping net boven het LCD-scherm is een oortje, dat wordt gebruikt als luidspreker tijdens telefoongesprekken. Onder het LCD-scherm bevindt zich een toetsenbord.

Achterkant van de telefoon

Een ronde insprong in het midden van het bovenste gedeelte van de telefoon is een SOS-noodknop. Aan de rechterkant van de SOS-noodknop bevindt de luidspreker.

Randen van de telefoon

Op de bovenkant van de telefoon bevindt zich een USB-poort en een audio-aansluiting. De onderkant van de telefoon bevat een microfoon.

Het verwijderen van de achterkant

Haak uw vingernagel in de openingsspleet rechtsonder aan de telefoon en trek de achterklep van het toestel weg tot u het hoort losklikken. Beweeg uw vinger rond de telefoon door de opening die nu is ontstaan tussen de telefoon en het klepje en verwijder het klepje aan de achterkant volledig. Zorg ervoor dat alle clips rond de rand zijn vastgeklikt bij het terugplaatsen van de achterklep.

Een SIM-kaart plaatsen

Om een SIM-kaart in de telefoon te plaatsen, moet u eerst de achterkant van de telefoon verwijderen, vervolgens de batterij. De SIM-kaartsleuf van de telefoon bevindt zich in de rechterbenedenhoek. Nadat u de SIM-kaart in het toestel heeft geplaatst, plaatst u eerst de batterij in het toestel om vervolgens de achterkant terug aan het toestel te bevestigen.

De telefoon inschakelen

Om de telefoon in te schakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat de telefoon trilt, er zal een startmelodie worden afgespeeld. De telefoon is klaar voor gebruik zodra hij begint te spreken. Als uw SIM-kaart is beveiligd met een PIN-code moet u die nu invoeren, u zult de PIN-code elke keer moeten invoeren wanneer u de telefoon inschakelt.

Bediening van de telefoon

Volumeknoppen

De twee bovenste knoppen aan de zijkanten van de telefoon regelen het volume van de stem.

Bedieningsknoppen

De bedieningsknoppen zijn de twee knoppen onder de volumeknoppen. De groene knop, aan de linkerkant, dient om te bevestigen of om een oproep te beantwoorden. De rode knop, aan de rechterkant, dient om te annuleren, een oproep af te breken of 1 niveau terug te keren in het menu.

Navigatieknop

Het bovenste deel van het toetsenbord, in het midden, wordt bezet door een 4-wegskanteltoets. Deze knop dient om te navigeren in de menu's. Duwt u op de onderste rand van deze toets, dan gaat u naar het volgende menu item, duwt u op de bovenste rand gaat u naar het vorige menu item. Het gekozen menu item kunt u bevestigen door in het midden van deze knop te drukken. Wanneer u op de middelst knop drukt wanneer de telefoon is vergrendeld, dan verteld de telefoon de huidige tijd.

Numeriek toetsenbord

De lay-out van het numerieke toetsenbord is identiek aan de lay-outs die in oudere mobiele telefoons werden gebruikt. Er zijn vier rijen van elk drie knoppen. De eerste rij bevat knoppen één, twee en drie. De tweede rij bevat knoppen vier, vijf en zes. De derde rij bevat de knoppen zeven, acht en negen. De laatste, vierde rij, bevat de knoppen * (ster), nul en # (kardinaalteken).

Wanneer u in een tekstveld staat worden de numerieke toetsen gebruikt voor het invoeren van tekst. Om een hoofdletter te typen drukt u eerst op #, de eerstvolgende letter die u nu invoert zal een hoofdletter zijn. Speciale tekens (@, & ...) zijn terug te vinden door op cijfer 1 te drukken.

SOS-noodknop

Op de achterzijde bevindt zich een SOS-noodknop. Wanneer deze knop voor minstens drie seconden wordt ingedrukt wordt er een noodoproep gestart naar een vooraf ingesteld nummer. U dient de oproep wel nog te bevestigen, een noodoproep kan gestart worden zonder het toetsenbord te ontgrendelen.

Wanneer er geen contact is toegewezen aan deze knop, zal na lang drukken een menu verschijnen om een contact toe te wijzen aan deze knop.

Blindshell functies

Hoofdscherm

Het hoofdscherm bevat alle informatie over de status van de telefoon (tijd, batterijstatus, gemiste oproepen, signaalsterkte, operator). Deze info wordt voorgelezen wanneer de telefoon ontgrendeld wordt. Om het voorlezen te onderbreken drukt u op de annuleer knop.

Om het hoofdscherm te verlaten en in het menu van de telefoon te komen drukt u op de bevestig knop of, onderaan op de navigatieknop.

Oproepen

Met dit menu item kunt u oproepen starten. Dit kan door een contact uit de contactlijst te kiezen, een nummer in te voeren. U kunt ook de recente oproepen raadplegen.

Berichten

Met dit menu item kunt u SMS berichten versturen of uw ontvangen SMS berichten lezen.

Contactpersonen

Hier kunt u uw contactlijst bekijken, een nieuw contact toevoegen, een sneltoets toewijzen aan een contact of uw contacten ordenen (op voor- of achternaam).

Hulpmiddelen

Onder dit menu item vindt u een wekker, timer, stopwatch, rekenmachine, notities en een kalender.

Instellingen

Hier kunt u de instellingen (geluiden, weergave, tijd en datum, toetsenblokkering, menu-navigatie) van uw telefoon wijzigen.

Schakel de telefoon uit

Door te bevestigen op dit menu item schakelt u de telefoon uit.

Voor de meest recente en meer uitgebreide handleiding kunt u terecht op www.blindshell.com .