

GObox: Netflix instellingen aanpassen

Via uw eigen Netflix account kunnen er bepaalde instellingen aangepast worden. Deze instellingen zorgen ervoor dat de GObox optimaal zal werken.

Via de **homepagina** van Netflix, kunt u rechts bovenaan het icoontje terugvinden van **uw profiel**. Daar kan er een menu uitgeklapt worden.



Kies hier voor de optie **“account”**.

Als u daarna verder naar beneden scrolt, ziet u het onderdeel **“Profiel en ouderlijk toezicht”**.

Hier kunt u opnieuw, via het pijltje naast uw profiel, een menu uitklappen.

Kies hier voor **“Weergave van ondertitels”**.

De instellingen moeten als volgt worden ingegeven:

- Lettertype = blokkeren
- Tekstgrootte = normaal
- Schaduw = uniform zwart

Weergave van ondertitels

Wijzig hoe ondertiteling wordt weergegeven voor Stefanie op alle ondersteunde apparaten.



Lettertype

Blokkeren ▼

Tekstgrootte: Normaal

A A A

Schaduw

Uniform ▼

Achtergrond



Venster



In datzelfde menu staat ook “instellingen voor afspelen”.

- Dit moet ingesteld worden op “hoog”

Instellingen voor afspelen

Knoppen voor automatisch afspelen voor Stefanie

- Speel de volgende aflevering van een serie automatisch af op alle apparaten.
- Tijdens het browsen op alle apparaten worden automatisch previews weergegeven.

Dataverbruik per scherm

- Automatisch
Standaardkwaliteit voor beeld en geluid, en dataverbruik
- Laag
Basiskwaliteit voor beeld en geluid, tot 0,3 GB per uur
- Normaal
Standaardkwaliteit voor beeld en geluid, tot 0,7 GB per uur
- Hoog
Beste kwaliteit voor beeld en geluid tot 3 GB per uur voor HD, 7 GB per uur voor Ultra HD

Opslaan

Annuleren

Nadat deze instellingen werden aangepast, zou de GObox de ondertiteling op Netflix goed moeten voorlezen.