

Gebruiksaanwijzing sprekend uurwerk Optelec

Wenst u deze handleiding in een ander formaat (braille, spraak, grootletterdruk) neem dan contact op met Optelec via info@optelec.be of tel. 050 35 75 55.

Dit uurwerk is spatwaterdicht, het mag niet in water ondergedompeld worden.


U vindt 4 knoppen op dit horloge:

B1 bovenaan links is de instelknop ("mode")

B2 onderaan rechts is de minuten knop ("minute")

B3 onderaan links uur knop ("hour")

B4 bovenaan rechts is de spraak knop ("talking")

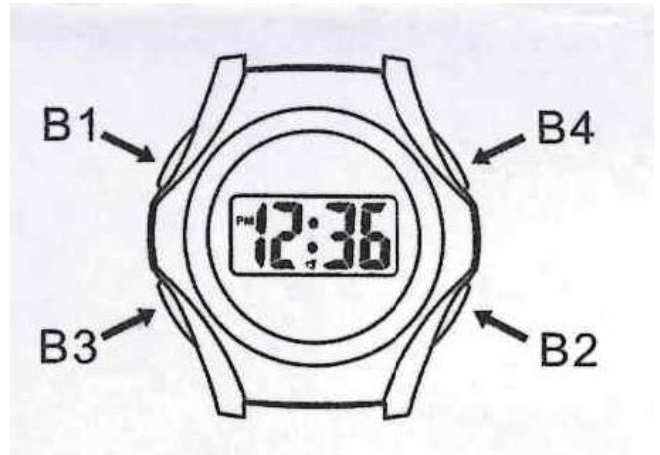

Tijd uitspreken: 1x op B4

Functie Instelknop B1 links bovenaan: 1 x drukken: **tijd** instellen, 2x drukken: de **alarmtijd** instellen, 3 x drukken: **uursignaal** instellen.

- **Tijd** instellen 1x drukken op B1 (bovenaan links), tijd goed zetten met uurknop (links onderaan) en de minuutknop (rechts onderaan).
- **Alarmtijd** in stellen 2x drukken op B1 (bovenaan links), alarm zetten met uurknop (links onderaan) en de minuutknop (rechts onderaan).
- **Uursignaal** instellen 3x drukken op B1 (bovenaan links), 1x op B3 uurknop (onderaan links): uursignaal uit, 2x op B3 uurknop: uursignaal enkel tussen 7u en 21u, 3x op B3 uurknop: uursignaal op elk uur.

Alarm inschakelen: 3x drukken op B1 (bovenaan links) en 1x op B2 (onderaan rechts)

Wanneer het alarm afgaat, druk op B4 (bovenaan rechts) voor Snooze (10 minuten).

Kies voor 12 of 24u formaat: druk op B3 (onderaan links)

Batterij

Wanneer het volume vermindert en/of de cijfers op het scherm minder duidelijk worden, dan is het wellicht tijd om het batterijtje te vervangen. U heeft hiervoor een CR 2025 lithium batterij nodig.