


Go-box: AppleTV ondertitel stijl aanpassen

Als er een Apple-TV wordt gebruikt voor het afspelen van video zoals bijvoorbeeld van Netflix, dan bepaald de Apple-TV zelf welk lettertype daarvoor gebruikt wordt. Hieronder wordt kort beschreven hoe die stijl zo ingesteld kan worden, zodat de Go-box dat goed kan voorlezen.

Hoofdmenu

Ga in het hoofdmenu van de AppleTV naar **Instellingen** (het tandwielletje)

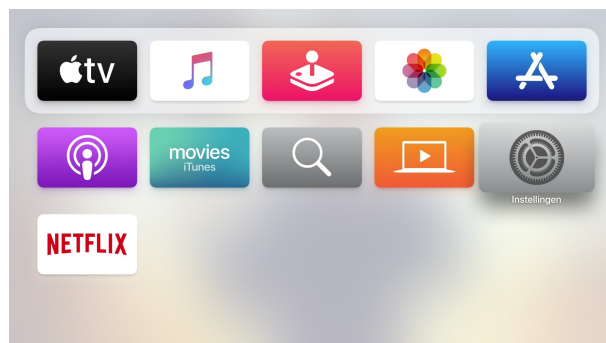

Instellingen

Ga vervolgens naar de optie **Algemeen**



Algemeen

Ga vervolgens naar **Toegankelijkheid**



Toegankelijkheid

Ga vervolgens naar **Ondertiteling en bijschriften**



Ondertiteling en bijschriften

Ga vervolgens naar **Stijl**

Stijl

Zorg dat er een **vinkje** staat bij **Doorzichtige achtergrond**

Ga vervolgens naar **Wijzig stijlen**

Wijzig stijlen

Ga vervolgens naar **Nieuwe stijl**

Nieuwe Stijl 1

Ga vervolgens naar **Lettertype**

Lettertype

Zorg dat **Lettertype** op **Helvetica** staat.

Zorg dat **Video krijgt voorrang boven stijl** op **Uit** staat.

De stijl van de ondertitels is nu juist ingesteld voor de Go-box.

