




Manuel de MyTime





Félicitations pour l'achat de **MyTime** l'horloge parlante de haute qualité en 6 langues. **MyTime** peut donner l'heure et le jour de la semaine en mode digitale ou analogique (sauf en langue allemande).

Langues: Allemand, Espagnol, Anglais, Italien, Français et Hollandais.

Comment configurer la langue:

1. Appuyez et **maintenez** la touche  puis appuyez et **maintenez** la touche DAY/LANGUAGE (JOUR/LANGUE) pendant 7 secondes et **MyTime** démarrera en anglais. Maintenez la touche  et appuyez sur la touche DAY/LANGUAGE plusieurs fois jusqu'à ce que vous entendiez votre langue parmi les 6.
2. Verrouillez la langue choisie avec  puis appuyez sur le bouton parler sur le boîtier de **MyTime**.

Comment régler les heures, les minutes et le jour:

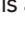1. Appuyez et **maintenez** la touche  puis appuyez sur la touche HOUR (HEURE) pour régler l'heure correcte. Maintenez la touche  puis appuyez sur la touche MINUTE pour régler les minutes correctes. Maintenez la touche  puis appuyez sur la touche DAY/LANGUAGE pour régler le jour exact.
2. Verrouillez l'heure et la date avec  puis appuyez sur le bouton parler sur le boîtier de **MyTime**.

Mode numérique = "14.10"


Mode digital = "2 heures 10 de l'après-midi"

Comment basculer entre les deux versions:

Dans toutes les langues, à l'exception de l'allemand, vous pouvez choisir que **MyTime** (mon heure) annonce l'heure et le jour soit en mode analogique soit en mode numérique. Pour basculer entre les deux versions, positionnez vous simplement sur 00.00 lors du réglage de l' « heure », et **MyTime** (mon heure) bascule automatiquement entre le mode analogique et le mode numérique.




Boutons

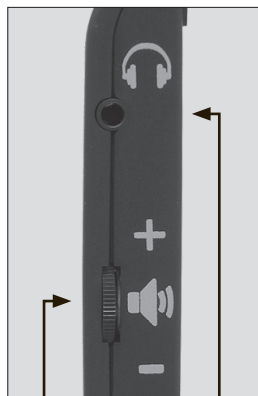

Contrôle du volume

Entrée pour écouteur

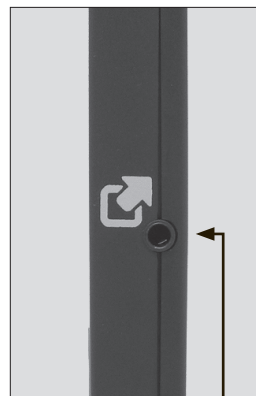

Dispositif externe pour activer le discours (non inclus)



Fixation magnétique